

BON USAGE

DES PRODUITS D'ENTRETIEN

POUR LES LOCAUX

 <p>ODORANT SENTEUR PIN SOLS, BANDEAUX ET AUTOLAVEUSE</p> <p>Détergent</p>	<p>Bandeaux : 1 pression (10 ml) dans 4L d'eau POMPE BLANCHE Autolaveuse : max. 20 ml Rincer uniquement si utilisé dans le cadre de <i>Clostridium difficile</i> - Port de gants</p> <p>Préparer la solution au moment de l'utilisation Valable pour le poste de travail Pas de conservation</p>
 <p>ANIOSURF® SOLS ET SURFACES</p> <p>Détergent Désinfectant</p>	<p>Dilution : 1 pression (10 ml) dans 4L d'eau POMPE BLANCHE Ne pas rincer Port des gants</p> <p>1 semaine dans un flacon daté, fermé et identifié</p>
 <p>ANIOS SPS PREMIUM® SANITAIRES</p> <p>Détartrant Détergent Désinfectant</p>	<p>Prêt à l'emploi Temps de contact : 5 minutes Rincer Port de gants</p> <p>Respecter la date de péremption</p>
 <p>LINGETTES WIP'ANIOS® OU SURFA'SAFE PREMIUM®</p> <p>Détergent Désinfectant</p>	<p>Prêt à l'emploi Ne pas rincer Port de gants Éliminer en sac noir (DAOM)</p> <p>Respecter la date de péremption</p>
 <p>EAU DE JAVEL BIDON 1L SOLS ET SURFACES</p> <p>Désinfectant</p>	<p>Utiliser pour <i>Clostridium difficile</i> Ajouter 4L d'eau froide = 5L de solution Port de gants</p> <p>Utiliser la solution sur la journée</p>
 <p>LINGETTES ALIMENTAIRES EURODEC®</p> <p>Désinfectant</p>	<p>Procéder par essuyage Lingettes sans rinçage Éliminer en sac noir (DAOM)</p> <p>Respecter la date de péremption</p>
 <p>TECHLINE SPRAY® CONTACT ALIMENTAIRE</p> <p>Détergent Désinfectant</p>	<p>Prêt à l'emploi Temps de contact : 5 minutes</p> <p>Respecter la date de péremption</p>

MODIFICATIONS APPORTÉES :

Ajustement des produits utilisés dans l'établissement, précautions d'emploi

BON USAGE

DES PRODUITS D'ENTRETIEN

POUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX



**ANIOXYDE
1 000®**
ENDOSCOPIES

Mélanger activateur et générateur
Utiliser sur matériel nettoyé
Port de gants manchettes longues
Masque et lunettes

1 semaine ou tous les 50 endoscopes
Tester quotidiennement à la bandelette



**SALVANIOS
PREMIUM®**
INSTRUMENTATION

Dilution: 1 pression (25 ml) dans 4L d'eau
POMPE ROUGE
Toujours rincer
Port de gants

Préparer la solution au moment de
l'utilisation
Valable pour le poste de travail
Pas de conservation



**TRISTEL DUO
OPH®**
LENTILLES DE
DIAGNOSTIC

Mousse détergente Tristel Clean sur lingette
sèche puis 2 doses de Tristel Duo sur lingette
sèche
Séchage : 30 secondes
Rinçage à l'eau stérile ou
bactériologiquement contrôlée

Respecter la date de péremption



**TRISTEL DUO
ULT®**
SONDES
ENDOCAVITAIRES

Mousse détergente Tristel Clean sur lingette
sèche, puis 2 doses de Tristel Duo Ult sur
lingette sèche
Séchage : 30 secondes

Respecter la date de péremption



TRISTEL TRIO®
SONDES D'ETO,
CYSTOSCOPE
NASOFIBROSCOPE

Lingette pré-nettoyante
Lingette sporicide + mousse activante
Temps de contact : 30 secondes
Lingette de rinçage

Respecter la date de péremption



TRIVOREX®

Poudre qui agit sur les produits chimiques
liquides déversés en les neutralisant et en
les solidifiant

Pas de limite de péremption tant que le
flacon n'a pas été ouvert

MODIFICATIONS APPORTÉES :

Ajustement des produits utilisés dans l'établissement, précautions d'emploi